

Центральный офис

Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова,
 д. 5, оф. 411, 414 (БЦ "Грибоедов")
тел./факс: (812) 314-3578, 314-3176, 314-5268
 e-mail: technodentspb@mail.ru

Офис в Москве (розничная торговля)

Москва, ул. Гиляровского,
 д. 57, стр. 1, оф. 503 (БЦ "Центросоюз")
тел.: (499) 689-5038, +7 (915) 162-3232
 e-mail: astokmsk@gmail.com



instagram.com/americanorthodonticsrussia



vk.com/americanorthodonticsrussia



facebook.com/americanorthodonticsrussia



доступная ортодонтия

MAP (Mini-Activator Posturer)

Материал для изготовления в клинических условиях мини активатора, позиционера, суставной капы, разобщающей пластины MAP (Mini-Activator Posturer).

Изготовление MAP в клинической практике

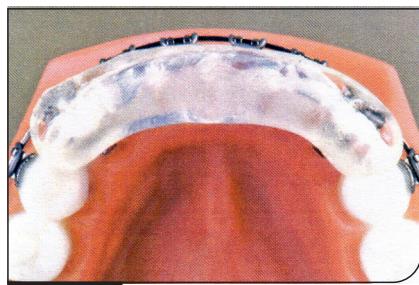


Рис 1

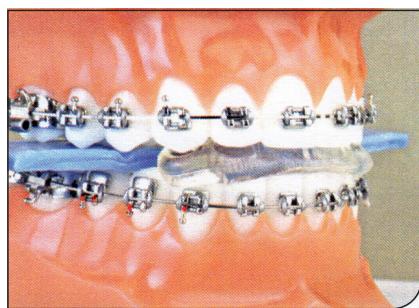


Рис 2

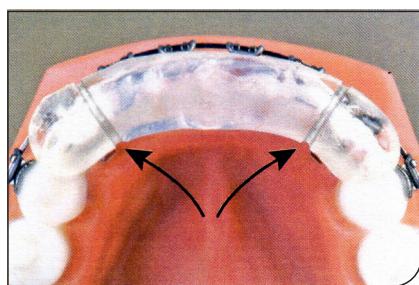


Рис 3



Рис 4

- Нагрейте MAP в горячей воде (180 F/82 C), в течение 30-ти секунд, либо до достижения мягкого и гибкого состояния.
- Извлеките и сразу поместите над нижним резцами, скорректируйте форму аппарата по форме зубной дуги (Рис 1).
- Направьте нижнюю челюсть пациента в такое положение, чтобы MAP оказался под верхними резцами (прямое резцовое соотношение). Пациент закрывает рот до желаемой высоты по вертикали. Таким образом Вы получаете прикусной шаблон резцов на MAP. Также можно предварительно изготовить прикусной шаблон по боковым зубам в качестве удобной направляющей для пациента (Рис 2).
- Попросите пациента надавить языком на MAP и язычную поверхность резцов, и одновременно прижмите MAP к вестибулярной поверхности резцов пальцами.
- Дайте MAP остинуть до температуры тела и затвердеть.
- Извлеките аппарат изо рта и охладите холодной водой для полного затвердевания материала.
- Убрать излишки материала или уменьшить толщину MAP можно на шлифмоторе с карборундовым диском или лабораторным микромотором с фрезой, предназначеннной для мягких пластмасс (материалов для перебазировки), например твердосплавной фрезой серии GE фирмы Brasseler.
- Сделайте небольшие бороздки для фиксирующих эластиков между клыком и боковым резцом с каждой стороны MAP. Бороздки должны проходить по всей вестибулооральной ширине. Приkleивание крючка или лингвальной кнопки на клык улучшит фиксацию (Рис 3 и Рис 4).
- Вновь поместите аппарат в рот пациента, проверьте фиксацию, дайте рекомендации по ношению и уходу: рекомендуется MAP носить круглосуточно, снимать только во время еды и чистки зубов.